



Montageanleitung

Einsatz-Setinstrument Art. Nr. 1150126

Aufbereitung

Allgemeine Grundlagen:

Alle Instrumente müssen vor jeder Anwendung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden; dies gilt insbesondere auch für die erstmalige Verwendung nach der Auslieferung, da alle Instrumente unsteril ausgeliefert werden (Reinigung und Desinfektion nach Entfernen der Transportschutzverpackung; Sterilisation nach Verpackung). Eine wirksame Reinigung und Desinfektion ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Sterilisation.


Bitte beachten Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung für die Sterilität der Instrumente bei der Anwendung grundsätzlich, dass nur ausreichend geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren für die Reinigung/Desinfektion und Sterilisation eingesetzt werden, dass die eingesetzten Geräte (Desinfektor, Sterilisator) regelmäßig gewartet und überprüft werden und dass die validierten Parameter bei jedem Zyklus eingehalten werden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die in Ihrem Land gültigen Rechtsvorschriften sowie die Hygienevorschriften der Arztpraxis bzw. des Krankenhauses. Dies gilt insbesondere für die unterschiedlichen Vorgaben hinsichtlich einer wirksamen Prioneninaktivierung.

Montage & Setzen des Einsatzes

Zusätzlich zu dieser Anleitung ist es nötig, dass Sie mit der produktspezifischen Operationstechnik vertraut sind.

1. Vor dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die Innenflächen des Keramik-Einsatzes trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sind.
2. Sollte der Saugnapf (1) nicht bereits vormontiert sein, diesen auf die Spitze des Griffstücks (2) aufsetzen. Hierbei ist zu beachten, dass der Saugnapf korrekt auf das Griffstück aufgesetzt wird.
3. Durch Andrücken des Saugnapfes an die Sphäre des Keramik-Einsatzes wird ein Vakuum erzeugt.
4. Passgenaues Positionieren des Keramik-Einsatzes in der Pfanne. Dabei ist sicherzustellen, dass dieser nicht verkantet.

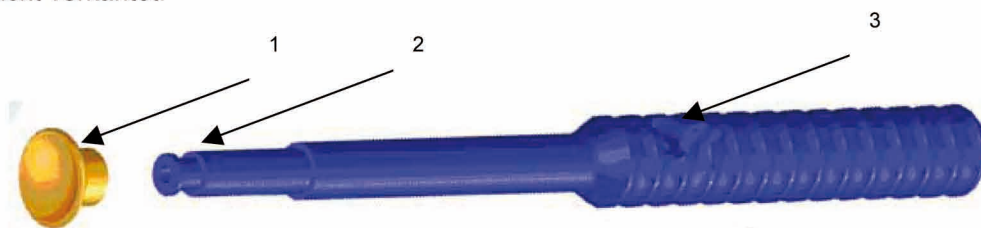

5. Nach dem Setzen und vor dem Entfernen des Instruments muss das Vakuum gelöst werden. Dies erfolgt durch Drücken auf den Knopf (3).
6. Die Kontrolle des einwandfreien Sitzes erfolgt durch Abtastung der Stirnflächen von Pfanne und Einsatz. Schließen beide rundherum sauber ab, sitzt der Einsatz korrekt in der Pfanne.

